


Ramitec® Penta® – Step-by-step


Bissregistrierung

Bite registration

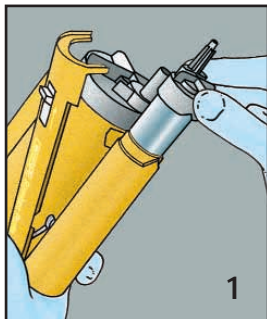

Einlegen des PentaMatic Schlauchbeutels in die ESPE Penta Kartusche.

Insert the PentaMatic foil bag into the ESPE Penta cartridge.

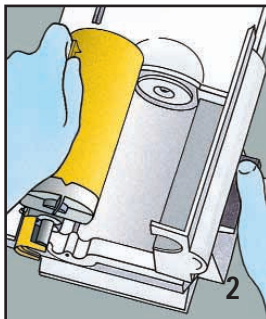

Einlegen der befüllten ESPE Penta Kartusche in das Pentamix Gerät.

Insert the loaded ESPE Penta cartridge into the Pentamix unit.

PentaMatic Aktivierung:
Knopf drücken: nach 15 – 25 s öffnet sich der PentaMatic Schlauchbeutel voll automatisch (akustisches Signal).

PentaMatic activation: Upon pressing the button the PentaMatic foil bag opens fully automatically after 15 – 25 sec. (audible signal).


Nur mit CE-Zeichen gekennzeichnete Mischkanülen verwenden.

Only use mixing tips that carry the CE mark.




Startmenge jedes PentaMatic Schlauchbeutels verwerfen.

For initial use extrude a small amount of material and discard it.

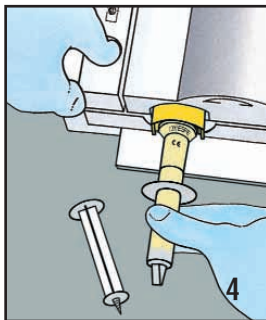

Befüllen der Applikationsspritze.

Fill the application syringe.

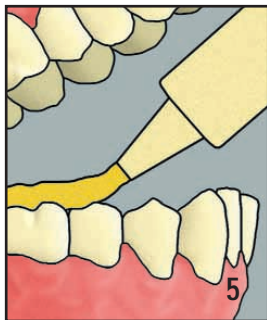


Ramitec Penta direkt auf die Zahnreihe applizieren.

Apply Ramitec Penta directly onto the teeth.

Ramitec® Penta® – Step-by-step


Bissregistrierung

Bite registration

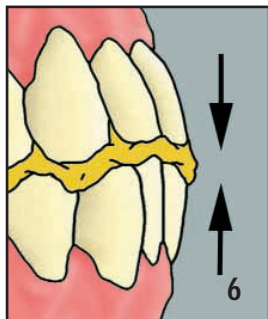


**In Schlussbissstellung
aushärten lassen.**

Allow to set in centric relation.

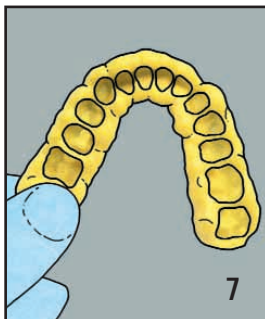

Fertiges Bissregistrat.

Finished occlusal record.

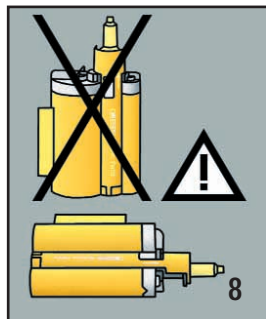

**Gebrauchsfertige Kartuschen
liegend lagern.**

ESPE recommends horizontal storage
of the ready-for-use cartridges.