

Trituration time :**Temps de trituration :****Table 1/Tableau 1 :**

Recommended amalgamator settings :

Ajustements recommandés pour les vibrateurs pour amalgame :

spherical
sphérique
admix

amalgamator	speed setting		
amalgamateur	réglage de vitesse		
Patterson Dental	Fixed / Fixe	8±1	7±1
Capmix (ESPE)		9±1	8±1
Vari-Mix II (Caulk)	M2	8±1	8±2
Vari-Mix III (Caulk)	M	8±1	8±2
Silamat (Vivadent)	Fixed / Fixe	8±1	7±1
Wig-L-Bug (Crescent) :			
	LP-60 Medium / Moyen	10±2	10±2
	SC-40	20±2	20±2
	S2000 Low / Faible	10±2	10±2
	DS80 Low / Faible	20±2	20±2
Spirit (Pelton Crane)	3500 CPM	10±2	10±2
Executive (Pelton Crane)		10±2	10±2
Torit	Fixed / Fixe	12±2	12±2
Duomat (Degussa)	3800 CPM	9±1	10±2
Zenith	M	10±2	10±2
AutoMix (Kerr)	3600 CPM	10±1	10±1

NOTE: Capmix, Vari-Mix II, Vari-Mix III, Silamat, Wig-L-Bug, Spirit, Executive, Torit, Duomat, Zenith and AutoMix are not the registered trademarks of Patterson Dental Supply Inc.

NOTE: Capmix, Vari-Mix II, Vari-Mix III, Silamat, Wig-L-Bug, Spirit, Executive, Torit, Duomat, Zenith and AutoMix ne sont pas des marques déposées de Patterson Dental Supply Inc.